

---

## Produktinformation Sec-Nurse Der Bettalarm

---



**ergoMotix®**

ergoMotix GmbH&CoKG  
Reha-Kommunikationstechnik  
D-21033 Hamburg  
Lohbrügger Kirchstraße 25

Tel: +49 (0) 40 / 725 887-0

Fax: +49 (0) 40 / 725 887-36

info@ergoMotix.com

www.ergoMotix.com

# Bett - ALARM!

## Sec-Nurse

Der Bett-Alarm Sec-Nurse ist ein hilfreiches und leicht zu bedienendes Hilfsmittel, um das Verlassen des Bettes, z.B. einer desorientierten Person, zu ermitteln und als Alarm weiterzuleiten. Das Gerät arbeitet im Wesentlichen mit einer Infrarotkamera, die das Verlassen des Bettes bei Tag und bei Nacht registrieren kann. Ein integrierter Timer erlaubt es, eine Zeit vorzugeben, innerhalb der die überwachte Person das Bett verlassen und wieder zurückkehren darf, bevor der Alarm ausgelöst wird. Dies kann z.B. sinnvoll sein, wenn das selbstständige Aufsuchen der Toilette als Zulässig eingeräumt werden soll. Die Einstellung des Gerätes ist weitgehend selbsterklärend, so dass das Handbuch des Gerätes nur selten hinzugezogen werden muss.

Die Kameraeinheit wird 180 cm über dem Fussboden mit dem beiliegenden Wandhalter mittig an einer der Bettwände befestigt. Über eine Infrarotfernbedienung (Im Lieferumfang) werden dann einmalig die Bettbegrenzungen markiert und die erlaubte Zeit nach Verlassen des Bettes eingestellt. Die Aktivierung der Sec-Nurse erfolgt schließlich z.B. durch das Pflegepersonal mit dem Verlassen des Raumes, ebenfalls über die Infrarotfernbedienung.

Sec-Nurse bietet den Betroffenen und deren Umfeld mehr Sicherheit und Freiheit im Alltag.

---

## Anschlussmöglichkeiten für die Alarmierung

### NEU: CaroCam Bild- und Tonübertragung auf ein DECT-Schnurlostelefon

Sobald der Bett-Alarm ausgelöst ist, erhalten Sie zusammen mit einem Speziellen Klingelton ein Bild von der betreuten Person auf Ihrem Schnurlostelefon. Nehmen Sie ab, können Sie freisprechen.

### Funk-Personensucher/ Autopager

Der Autopager A-100 ist eine Alarmeinheit auf Funk-Basis mit einer Reichweite von bis zu 900 Meter. Der Empfänger hat in etwa die Größe einer Streichholzschachtel und kann auf Piepton oder Vibration eingestellt werden. Der Empfänger arbeitet mit Batterien. Der Sender arbeitet im Netzbetrieb.

### Alarm über Telefon

Bei dieser Lösung können bis zu vier beliebige Telefonnummern, also auch Mobilfunknummern programmiert werden, die im Auslösefall über einen vorhandenen Telefonanschluss nacheinander angewählt werden. Der Empfänger muss quittieren.

### Rufanlagen/Alarmzentralen

Sec-Nurse kann an die meisten vorhandenen Lichtrufanlagen/Schwesternrufanlagen angepasst werden.

---

## Einstellmöglichkeiten und Technische Daten:

TIMER: 0, 3, 5, 10, 20 Min

IR-FB Batterielebensdauer:  
ca. 1 Jahr

Ausgang:  
4 Meter Anschlussleitung mit  
8-poligem RJ-45 Stecker.

Stromversorgung:  
12V - 40V DC / 12V - 28V AC

Betriebstemperatur: 5 - 50 °C

Leistungsaufnahme: <3000 mW.

Abmessungen:  
166 mm x 68 mm x 77 mm

Relaisausgang:  
Max. 0,5 A 60 VAC.  
Max. 1,0 A 30 VDC.

Schutzklasse: IP44

Beleuchtungsbedingungen:  
1 - 25.000 Lux

Gewicht: 290 g

**www.ergoMotix.com**

---

**A C H T U N G!** Dieser Art Geräte entbinden nicht von der Sorgfaltspflicht der Aufsichtsperson. Beachten Sie stets, dass es unter Umständen trotz umfangreicher technischer Sicherheitsmaßnahmen zum Funktionsausfall kommen kann. Vergewissern Sie sich im Zweifelsfall durch regelmäßige Probebedienung, ob alle Funktionen einwandfrei arbeiten.